

BLUTZUCKER-KONTROLLE ...?



GLUCOFAST® MONO

Glukose-Messsystem



Das **Glucofast® mono** Geräteset enthält folgende Bestandteile:

- **Glucofast® mono** Messgerät
- 3 V Lithium-Batterie
- Kontrollelektrode
- Gebrauchsanleitung
- Bereitschaftsetui

Glucofast® mono ist ein technisch hochaktuelles, extrem bedienerfreundliches, elektrosensorisches Blutzucker-Messsystem, welches im Rahmen der Blutzuckerselbstkontrolle von Diabetikern eingesetzt werden kann.

TECHNISCHE DETAILS

- minimaler Blutbedarf (3 µL)
- selbstansaugende Blutzuckermesselektrode
- kurze Reaktionszeit (10 Sekunden)
- Maßeinheiten umstellbar – konventionell – SI (mg/dL – mmol/L)
- großes, gut lesbares Display mit deutlich sichtbarer Anzeige
- Menüführung durch leichtverständliche Piktogramme
- Geräteüberprüfung mittels beiliegender Kontrollelektrode, Systemprüfung mittels optional erhältlichen Kontrolllösungen
- erfüllt die Anforderungen an Blutzuckermesssysteme zur Eigenanwendung beim Diabetes mellitus (ISO15197:2003)
- automatische Ein- und Ausschaltfunktionen ermöglichen Bedienung ohne Schalter
- weiter Messbereich (30 – 550 mg/dL bzw. 1,7 – 30,6 mmol/L)
- leicht: 64 g inklusive Batterie
- klein und handlich: 100 x 50 x 19 mm
- Stromversorgung: handelsübliche 3 V Lithium-Batterie (ausreichend für ca. 1.000 Messungen)
- Messelektroden trotz minimalen Blutbedarfs von handlicher Größe mit komfortablem Griffstück – somit optimal auch für ältere Patienten
- Blutauftrag von Fingerbeere oder Ohrfläppchen möglich

KURZANLEITUNG

1. Code-Chip der aktuellen Teststreifencharge in das Gerät einsetzen (Abb. 1).
2. Messelektrode in das Gerät einsetzen (Abb. 2). Gerät schaltet sich automatisch ein.
3. Beim Blinken des Tropfensymbols im Display (Abb. 3) Blut auftragen (Abb. 4). Messung startet automatisch.
4. Nach Ablauf der Reaktionszeit wird das Ergebnis in der gewünschten Maßeinheit angezeigt (Abb. 5). Die Messwerte werden automatisch in den Speicher übernommen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

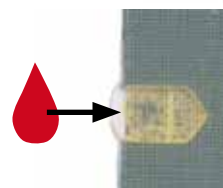


Abb. 4



Abb. 5



GLUCOFAST MONO_handzettel_A4_Stand_04-2009

Service und Vertrieb in Deutschland:



IMCARMED GmbH
Hauptstraße 27 f
23923 Lüdersdorf

Tel.: 03 88 21-6 20 30
Fax: 03 88 21-6 20 73
E-mail: info@imcarmed.de